

AQUAglide®

medizinisches Gleitgel *medical lubricant*

Made with Love
in Europe ★★★★★

Ein Hauch sanfter
Frische für Körper
und Seele.



- besonders sanft zu sensibler Haut
- natürliches Gefühl
- FREI von Konservierungsstoffen wie Paraben
- mit feuchtigkeitsspendendem und pflegendem Panthenol
- dermatologisch getestet



Die geschmeidige Textur von AQUAglide sensitive entdecken und erleben. Ein Hauch sanfter Frische für Körper und Seele. Für besondere, leidenschaftliche und langanhaltende Momente der Lust – FREI von Paraben und mit pflegendem Panthenol für ein besonders intensives Gleiterlebnis.

AQUAglide sensitive schenkt dir Augenblicke voll pulsierender Leidenschaft und endlose Stunden der Hingabe und Verschmelzung. Millionen zufriedener Kunden vertrauen auf die erstklassige Qualität von AQUAglide. Es ist besonders sensitiv, äußerst hautfreundlich und hochergiebig.

Dermatologische Tests bestätigen die hohe Hautfreundlichkeit des Gleitgeles und sorgen für unbeschwertes Einsatz beim Liebespiel. AQUAglide® kann zudem bedenkenlos mit Latex und Kondomen/[Empfehlung_MY.SIZE Kondome](#) verwendet werden.



JOYDIVISION international GmbH
Eckenerstrasse 3 · 30179 Hannover
Germany
www.JOYDIVISION.de
sales@JOYDIVISION.de



Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt
Germany
www.amor.ag
info@amor.ag

PRRC
Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt
Germany
Herr Alfred Praschl
APraschl@amor.ag

JOYDIVISION
...my Lovestyle!

Artikelinformationen

Dieses öl- und fettfreie medizinische Gleitgel auf Wasserbasis ist haut- und schleimhautverträglich, kondomgeeignet und rückstandsfrei mit Wasser abwaschbar. Es ist kein empfängnisverhütendes Mittel und bietet auch keinen Schutz vor Infektionen. Zweckbestimmung: Dieses Medizinprodukt dient zur zusätzlichen Befeuchtung im Intimbereich beim Geschlechtsverkehr, um mechanischen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut vorzubeugen, sodass ein Eindringen von Krankheitserregern durch verletzte Stellen verhindert wird. Achtung: Bei Kinderwunsch nicht oder nur sparsam einsetzen, da die Empfängnis erschwert werden könnte.

Anwendung

Gewünschte Menge mit den Fingern im Intimbereich auftragen. Bei der Verwendung mit Kondomen, das Gleitgel außen auf das abgerollte Kondom auftragen.

Reinigung

AQUAglide® ist vollständig mit Wasser abwaschbar. Eintrocknete Rückstände der Bettwäsche können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln fleckenfrei entfernt werden.

Lagerung

Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern.

Warnhinweise

AQUAglide® ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält keine spermiziden Wirkstoffe und bietet auch keinen Schutz vor Infektionen. Gynäkologen raten Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen, oder wegzulassen, da diese die Empfängnis erschweren könnten.

Kontraindikationen

Bei Allergien oder Reaktion auf bestimmte Inhaltsstoffe, bitte die „Ingredients (INCI)“ beachten. Treten Unverträglichkeiten auf, das AQUAglide® bitte gut abwaschen und gegebenenfalls an den Hausarzt oder Gynäkologen wenden.

Bei weiteren Fragen bitte das JOYDIVISION Team kontaktieren.

Ingredients (INCI):

Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoin, Benzoic Acid, Panthenol

Weitere Sprachen in der Gebrauchsanweisung unter:

www.AQUAglide.de



de uk

Made with Love
in Europe ★★★★★

Art.-Nr. 11741, 125ml

PZN 11535276

EAN 4028403117411

de uk

Breite	Tiefe	Höhe
4,5 cm	4,5 cm	15,5 cm

Gewicht	VPE
154 g	25

Lagerung

Vor Nässe schützen

Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen



Haltbarkeit nach Anbruch

3 Monate haltbar



Verwendung

Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt wurde



Recycling

Grüner Punkt

Flaschen



JOYDIVISION international GmbH
Eckenerstrasse 3 · 30179 Hannover
Germany ©
www.JOYDIVISION.de
sales@JOYDIVISION.de



Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt
Germany
www.amor.ag
info@amor.ag

PRRC
Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt
Germany
Herr Alfred Praschl
APraschl@amor.ag

JOYDIVISION
...my Lovestyle!